

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Venta: Seitensicherung und Häupter

22. Februar 2018 // **Wussten Sie schon?**

Unsere Betten und Möbel stecken voller praktischer Details, die den Pflegekräften die Arbeit erheblich erleichtern. Doch im hektischen Alltag hat man nicht immer alles präsent und macht sich unnötige Mühe.

### 2 hilfreiche Tipps zum Pflegebett Venta

Unsere Betten und Möbel stecken voller praktischer Details, die den Pflegekräften die Arbeit erheblich erleichtern. Doch im hektischen Alltag hat man nicht immer alles präsent und macht sich unnötige Mühe.

In unserer neuen Serie „Wussten Sie schon ...?“ stellen Ihnen daher die Produktmanager von Stieglmeyer und Burmeier die hilfreichsten Funktionen unserer Betten vor. Zum Auftakt zeigt Michaela Amedick, neue Produktmanagerin für den Bereich Care (stationäre Pflege), die besonderen Stärken des Niedrigbettes Venta.



Michaela Amedick, Produktmanagerin im Bereich Pflegeheim.

1. Die Venta-Seitensicherung lässt sich mit nur einer Hand mühelos ansenken.



Wussten Sie schon ... ?

2. Schieben Sie einfach mit einem Finger die rote Sicherung nach vorn und senken Sie die Seitensicherung mit sanftem Druck in Richtung Fußende ab.



Wussten Sie schon ... ?

3. Nach dem Schwung mit den Händen richten sich die Seitensicherungen gedämpft von selbst wieder auf. Vom Fußende aus lassen sich beide Seiten gleichzeitig bedienen.



Wussten Sie schon ... ?

1. Pflegetätigkeiten wie Fußpflege oder Haarewaschen sind viel einfacher, wenn am Kopf- und Fußende ein ungehinderter Zugang zum Bewohner besteht. Dabei helfen unsere optionalen entnehmbaren Häupter.



Wussten Sie schon ... ?

2. Die Häupter lassen sich einfach und werkzeuglos hochziehen oder wieder auf ihre Befestigungen schieben. Die Pflegekraft gewinnt in vielen Situationen Zeit.



Wussten Sie schon ... ?