

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Die teleskopierbare Seitensicherung am Pflegebett Regia

11. Oktober 2018 // **Wussten Sie schon?**

Mit der geteilten teleskopierbaren Seitensicherung (TSG) am Pflegebett Regia hat Burmeier dafür eine optimale Lösung entwickelt. Nur kopfseitig angestellt, lässt die TSG genug Platz für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg.

### Die teleskopierbare Seitensicherung am Pflegebett Regia

Auch in der Pflege zuhause ist es ein wichtiges Ziel, die Bewohner vor Stürzen zu schützen und zugleich ihre Mobilität zu bewahren. Mit der geteilten teleskopierbaren Seitensicherung (TSG) am Pflegebett Regia hat Burmeier dafür eine optimale Lösung entwickelt. Nur kopfseitig angestellt, lässt die TSG genug Platz für einen ungehinderten Ein- und Ausstieg. Zusätzlich bietet sie zahlreiche Möglichkeiten, das Bedürfnis des Bewohners nach räumlicher Orientierung individuell zu erfüllen. Unser Produktmanager Frank Himmelskötter zeigt, wie einfach das geht.



Frank Himmelskötter, Produktmanager

1. Die kopfseitigen und fußseitigen Hälften der TSG lassen sich in 2 Stufen nach oben ziehen. Auf der 1.

Stufe genießt der Bewohner ein Gefühl von Halt und Sicherheit ohne den Eindruck, hinter einer hohen Barriere zu liegen. Je nach Geschmack kann der Pflegeverantwortliche diese 1. Stufe ohne Knopfdruck oder Werkzeug auf 2 Arten einstellen: Entweder zieht er das metallische obere Element hoch ...



Wussten Sie schon ... ?

2. ... oder er wählt das untere Element mit einer wohnlichen Holzoptik.



Wussten Sie schon ... ?

3. Für normgerechten maximalen Schutz zieht man beide Elemente hoch. Doch auch jetzt bleibt die Bewegungsfreiheit des Bewohners erhalten, wenn der fußseitige Teil der Seitensicherung nicht angestellt wird.



Wussten Sie schon ... ?

4. Eine weitere Möglichkeit, dem Pflegebedürftigen ein gutes Gefühl von Halt und räumlicher Orientierung zu vermitteln, ist die diagonale Anstellung des oberen Elements. Ziehen Sie dazu nur das kopfseitige Ende des Holms nach oben.




Wussten Sie schon ... ?

5. Um die Seitensicherung wieder abzusenken, heben Sie den Holm leicht an und drücken zugleich die beiden Knöpfe rechts und links an der Unterseite des Holms. Diese Knöpfe befinden sich sowohl am oberen Element ...



Wussten Sie schon ... ?

6. ... als auch am unteren Element.

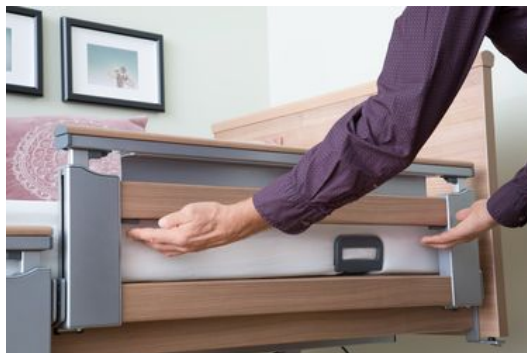

Wussten Sie schon ... ?