

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Die Bettverlängerung am Pflegebett Venta

20. Dezember 2018 // **Wussten Sie schon?**

Große Bewohner im Pflegeheim profitieren sehr von einer Bettverlängerung. In unserem Niedrigbett Venta ist eine ausziehbare Verlängerung um 20 cm serienmäßig enthalten. Produktmanagerin Michaela Amedick zeigt Ihnen, wie einfach Sie diese Konstruktion ohne Werkzeug aktivieren können.

## Die Bettverlängerung am Pflegebett Venta

Große Bewohner im Pflegeheim profitieren sehr von einer Bettverlängerung. In unserem Niedrigbett Venta ist eine ausziehbare Verlängerung um 20 cm serienmäßig enthalten. Produktmanagerin Michaela Amedick zeigt Ihnen, wie einfach Sie diese Konstruktion ohne Werkzeug aktivieren können.



Produktmanagerin Michaela Amedick

Die Bettverlängerung des Niedrigbettes Venta lässt sich ohne Werkzeug mühelos ausziehen.



Wussten Sie schon?

Ziehen Sie zunächst die beiden Knöpfe unter dem Fußteil nach unten und lösen Sie die Knöpfe mit einer Vierteldrehung, bis sie einrasten.



Wussten Sie schon?

Jetzt können Sie das Fußteil fassen und die Bettverlängerung ausziehen. Die teleskopierbaren Seitenblenden sind Zubehör.



Wussten Sie schon?

Drehen Sie nun die beiden Knöpfe um eine Vierteldrehung zurück.



Wussten Sie schon?

Schieben Sie anschließend das Fußteil langsam vor und zurück, bis die Knöpfe hörbar einrasten. Jetzt ist die Bettverlängerung verriegelt und kann genutzt werden.



Wussten Sie schon?