

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Einstellung der Fußhochlage mit dem Handschalter beim Pflegebett Regia

29. Januar 2019 // **Wussten Sie schon?**

Viele Nutzer unserer Pflegebetten schätzen es sehr, von Zeit zu Zeit die Fußhochlage einzustellen und dadurch ihre Unterschenkel in eine angehobene waagerechte Position zu bringen. Unser Produktmanager Frank Himmelskötter zeigt Ihnen, wie Sie diese Position am Pflegebett Regia von Burmeier in wenigen Schritten mit dem Handschalter einstellen können.

Einstellung der Fußhochlage mit dem Handschalter beim Pflegebett Regia

Viele Nutzer unserer Pflegebetten schätzen es sehr, von Zeit zu Zeit die Fußhochlage einzustellen und dadurch ihre Unterschenkel in eine angehobene waagerechte Position zu bringen. Unser Produktmanager Frank Himmelskötter zeigt Ihnen, wie Sie diese Position am Pflegebett Regia von Burmeier in wenigen Schritten mit dem Handschalter einstellen können.



Wussten Sie schon ...?



Wussten Sie schon ...?

1) Heben Sie zunächst die Oberschenkellehne an. Drücken Sie dazu am Handschalter die linke Taste in der 2. Reihe.



Wussten Sie schon ...?

2) Die Oberschenkellehne hebt sich, die Unterschenkellehne bleibt zum Fußende hin noch abgesenkt.



Wussten Sie schon ...?

3) Fahren Sie nun die Oberschenkellehne wieder ein Stück weit herunter. Drücken Sie dazu am Handschalter die rechte Taste in der 2. Reihe. Je weiter Sie die die Lehne absenken, desto waagerechter ist im nächsten Schritt die Anstellung der Unterschenkellehne. Bringen Sie die Liegefläche aber nicht wieder komplett in die waagerechte Position.



Wussten Sie schon ...?

4) Heben Sie die jetzt die Oberschenkellehne erneut an. Drücken Sie dazu am Handschalter die linke Taste in der 2. Reihe.



Wussten Sie schon ...?

5) Unter der Unterschenkellehne werden dabei automatisch die beiden Rastmaten aktiviert.



Wussten Sie schon ...?

6) Die Unterschenkellehne hebt sich mit an und fährt in die Fußhochlage. Wenn Sie diese Position wieder beenden möchten, senken Sie einfach die Oberschenkellehne ab, bis die Liegefläche waagrecht ist.