

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Einfache Bedienung mit dem LCD-Handschalter

28. Februar 2019 // **Wussten Sie schon?**

Die Krankenhausbetten Puro und Evario lassen sich sehr einfach mit unserem modernen LCD-Handschalter steuern. Produktmanagerin Annika Pohlmann erklärt, wie Sie jederzeit in wenigen Schritten alle Funktionen nutzen und sicher verwalten können.



Wussten Sie schon?

Um eine andere Verstellfunktion auszuwählen, können Sie einfach mit dem oberen Wippschalter nach rechts oder links durch die möglichen Optionen auf dem Display navigieren. Hier im Bild die Höhenverstellung der Liegefläche.



Wussten Sie schon?

Standardmäßig ist die Patientenebene eingestellt, auf der sich die Verstellfunktionen des Bettes einfach anwählen und ausführen lassen. Hier ist z. B. die Verstellung der Rückenlehne zu sehen. Drücken Sie die Tasten „Pfeil auf“ oder „Pfeil ab“, um die Rückenlehne anzuheben oder abzusenken.



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?

Nun stehen Ihnen alle Verstellfunktionen zur Verfügung, ohne dass sich die Einstellungen für den Patienten ändern.

Nun können Sie mit der Wipptaste durch hilfreiche Funktionen navigieren – z. B. die voreingestellte Waschposition ändern, eine Fehleranalyse oder einen Reset durchführen.

Wird der LCD-Handscharter eine Zeitlang nicht genutzt, wechselt er aus jeder Ebene zurück zum Patientenmodus.



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?

Sie haben als Pflegekraft einige Verstellfunktionen für den Patienten gesperrt, möchten diese aber selbst schnell und unkompliziert nutzen? Dann wählen Sie die Bedienebene EasyCare. Halten Sie dazu die Wipptaste beidseitig vor dem Magneten gedrückt, bis das EasyCare-Symbol auf dem Display erscheint.

Um in die Ebene für technisches Personal zu gelangen, halten Sie die Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ 5 Sekunden lang vor dem Magneten gedrückt, während ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt wird. Die Anzeige „OK“ bestätigt den Wechsel in die Technikerebene.



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?

Die Krankenhausbetten Puro und Evario lassen sich sehr einfach mit unserem modernen LCD-Handscharter steuern. Produktmanagerin Annika Pohlmann erklärt, wie Sie jederzeit in wenigen Schritten alle Funktionen nutzen und sicher verwalten können.



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?

Der LCD-Handschalter liegt leicht und ergonomisch in der Hand. Er besitzt ein großes beleuchtetes Display und 3 Tasten. Der Handschalter bietet maßgeschneiderte Bedienebenen für Patienten, Pflegekräfte und technisches Personal.

Um von der Patientenebene in die Bedienebene für das Pflegepersonal zu wechseln, halten Sie den Handschalter vor den orangefarbenen Entsperrmagneten. Beim Puro befindet er sich fußseitig unter der Seitensicherung, beim Evario ist er kopfseitig in die Protega-Seitensicherung integriert.

Auch auf der Pflegepersonal-Ebene navigieren Sie mit der oberen Wipptaste durch die Optionen. Neben der CPR-Position stehen z. B. die Trendelenburg-Position sowie die einzelne Sperrung aller Verstellfunktionen zur Auswahl. Mit den Tasten „Pfeil auf“ und „Pfeil ab“ können Sie z. B. Verstellungen der Rückenlehne oder der Oberschenkellehne sperren und entsperren. Die Pflegepersonal-Ebene ist für die schnelle Reaktion in Notsituationen und die Verwaltung der Funktionen vorgesehen. Die normalen Steuerfunktionen der Patientenebene sind hier nicht enthalten.

Ebene für Pflegepersonal: Sonderfunktionen & Funktion sperren

EasyCare – Bedienung trotz Sperrung