

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Das werkzeuglose Easy-Click-System für die Dali-Serie

13. November 2019 // **Wussten Sie schon?**

Das Pflegebett Dali von Burmeier überzeugt Nutzer und Händler durch seine leichte Bedienbarkeit. Mit dem Easy-Click-System lässt sich die durchgehende Seitensicherung werkzeuglos einsetzen und entnehmen. Das spart beim Auf- und Abbau des Bettes viel Zeit und Aufwand. Frank Himmelskötter, unser Produktmanager für den Bereich Pflege zuhause, erklärt die einfache Handhabung des patentierten Easy-Click-Systems.

Wussten Sie schon?

Das werkzeuglose Easy-Click-System für die Dali-Serie

Das Pflegebett Dali von Burmeier überzeugt Nutzer und Händler durch seine leichte Bedienbarkeit. Mit dem Easy-Click-System lässt sich die durchgehende Seitensicherung werkzeuglos einsetzen und entnehmen. Das spart beim Auf- und Abbau des Bettes viel Zeit und Aufwand. Frank Himmelskötter, unser Produktmanager für den Bereich Pflege zuhause, erklärt die einfache Handhabung des patentierten Easy-Click-Systems.



Wussten Sie schon?

Auf Wunsch lassen sich die 4 Holme der Seitensicherung gemeinsam in einer praktischen Tragetasche verstauen. So sind sie jederzeit griffbereit und leicht zusammen zu transportieren. Die Tragetasche ist als Zubehör bestellbar.



Wussten Sie schon?

An den Kopf- und Fußteilen der Dali-Betten sind bereits Halterungen für die Seitensicherung vormontiert. Senken Sie die Enden der Holme in die Aufnahmen der Halterungen.



Wussten Sie schon?

Der Bolzen an der Kappe des Holms wird dabei in die Aufnahme gelegt und durch den Auslöseknopf automatisch gesichert. Dieser Auslöseknopf ist ab sofort durch seine neue orange Färbung noch besser zu erkennen.



Wussten Sie schon?

Der Holm ist nun sicher eingerastet und vor einer unbeabsichtigten Auslösung geschützt.



Wussten Sie schon?

Die Schutzhöhe der durchgehenden Seitensicherung beträgt beim Dali 37 cm.



Wussten Sie schon?

Um die Seitensicherung abzusenken, hebt man den Holm etwas an, drückt dann den Metallhebel über der Halterung nach unten und senkt den Holm ab.



Wussten Sie schon?

Mit dem Easy-Click-System lässt sich die der Holm auch wieder mühelos entfernen. Besonders einfach funktioniert dies, wenn Sie mit dem Daumen den orangefarbenen Auslöseknopf nach vorn ziehen. Die Verwendung eines Schraubenziehers oder anderen Werkzeuges ist nicht notwendig und könnte die Halterung beschädigen.



Wussten Sie schon?

Die ausgelösten Holme lassen sich nun nach oben entnehmen und wieder in der optionalen Tragetasche verstauen.