

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



So speichern Sie an Ihrem Pflegebett die optimale Aufstehhöhe

25. Juni 2020 // **Wussten Sie schon?**

Unsere Pflegebetten der Serien Elvido und Venta überzeugen mit einem besonders großen Höhenverstellbereich von ca. 25 bis 80 cm. Während der Verstellung legen die Betten bei ca. 38 cm einen Zwischenstopp ein, denn diese Höhe eignet sich für viele Menschen ergonomisch ideal zum Aufstehen und Hinsetzen. Was aber ist zu tun, wenn sehr kleine oder sehr große Bewohner eine andere automatische Aufstehhöhe wünschen? Produktmanagerin Michaela Amedick erklärt, wie Sie den Zwischenstopp mithilfe des Handschalters mühelos ändern können.

So speichern Sie an Ihrem Pflegebett die optimale Aufstehhöhe

Unsere Pflegebetten der Serien Elvido und Venta überzeugen mit einem besonders großen Höhenverstellbereich von ca. 25 bis 80 cm. Während der Verstellung legen die Betten bei ca. 38 cm einen Zwischenstopp ein, denn diese Höhe eignet sich für viele Menschen ergonomisch ideal zum Aufstehen und Hinsetzen. Was aber ist zu tun, wenn sehr kleine oder sehr große Bewohner eine andere automatische Aufstehhöhe wünschen? Produktmanagerin Michaela Amedick erklärt, wie Sie den Zwischenstopp mithilfe des Handschalters mühelos ändern können.



Wussten Sie schon?




Wussten Sie schon?

Bringen Sie das Bett mit dem Handschalter auf die gewünschte neue Aufstehhöhe.



Wussten Sie schon?

Testen Sie gemeinsam mit dem Bewohner, ob die neue Höhe wirklich bequem und sicher ist. Die Fußsohlen des Bewohners sollten vollständig den Boden berühren, wenn er auf der Bettseite sitzt.

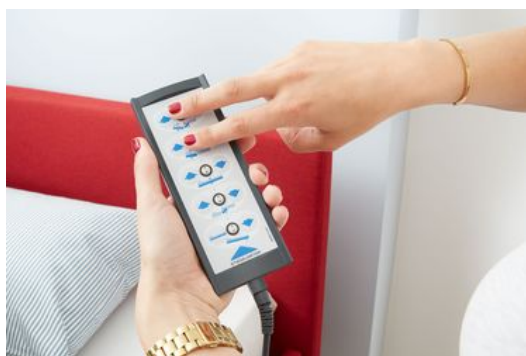


Wussten Sie schon?

Wenn die neue Aufstehhöhe definitiv eingestellt ist, drücken Sie auf dem Handschalter dreimal hintereinander gleichzeitig die beiden oberen linken Tasten.



Wussten Sie schon?

Drücken Sie danach sofort die dritte linke Taste von oben. Nun ertönt ein Signalton zur Bestätigung, dass der neue Zwischenstopp gespeichert ist.

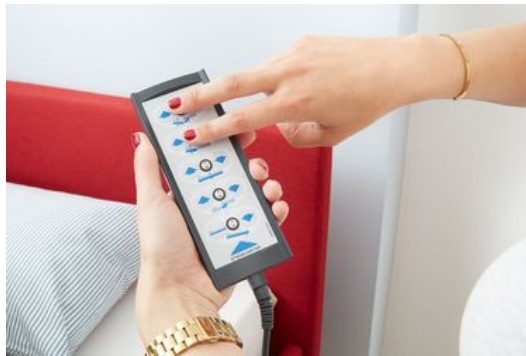

Wussten Sie schon?

Ebenso einfach können Sie die Werkeinstellung mit dem Zwischenstopp bei ca. 38 cm wiederherstellen, wenn z. B. ein neuer Bewohner das Bett nutzt. Drücken Sie dazu erneut dreimal hintereinander gleichzeitig die beiden oberen linken Tasten.



Wussten Sie schon?

Drücken Sie direkt im Anschluss 5 Sekunden lang die dritte rechte Taste von oben. Es ertönt ein pulsierender Signalton. Wenn er verstummt, ist das Bett auf die Werkeinstellung zurückgesetzt.