

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Trennung des Partnerbettes

19. Januar 2021 // **Wussten Sie schon?**

Unser neues Partnerbett eröffnet Paaren zuhause und in der Pflege neue Möglichkeiten. Die Modelle **Libra partner** und **Regia partner** lassen sich mit wenigen Handgriffen trennen und wieder zusammenfügen, wenn eine Pflegesituation dies erfordert oder die Partner eine Zeitlang an verschiedenen Orten übernachten möchten. Lasse Radtke, Trainee im Produktmanagement bei Stieglmeyer, zeigt die Trennung der Betthälften am Beispiel des Komfortbettes **Libra partner**.

Wussten Sie schon?

Trennung des Partnerbettes

Unser neues Partnerbett eröffnet Paaren zuhause und in der Pflege neue Möglichkeiten. Die Modelle **Libra partner und **Regia partner** lassen sich mit wenigen Handgriffen trennen und wieder zusammenfügen, wenn eine Pflegesituation dies erfordert oder die Partner eine Zeitlang an verschiedenen Orten übernachten möchten. Lasse Radtke, Trainee im Produktmanagement bei Stieglmeyer, zeigt die Trennung der Betthälften am Beispiel des Komfortbettes **Libra partner**.**



Wussten Sie schon?



Wussten Sie schon?

Bringen Sie zunächst das Bett mit dem Handschalter auf eine Höhe, in der Sie bequem hantieren können.



Wussten Sie schon?

Auf der maximalen Höhe von 80 cm können auch großgewachsene Personen rückschonend arbeiten und haben freien Zugang zum Untergestell.



Wussten Sie schon?

Schlagen Sie nun die Matratzen zurück. Die beiden Liegeflächen des Partnerbettes sind am Fußende und in der Mitte jeweils mit einem weißen Brückenelement verbunden – hier das Element am Fußende.



Wussten Sie schon?

Entnehmen Sie beide Elemente. Dazu benötigen Sie kein Werkzeug.



Wussten Sie schon?

Lösen Sie nun die Bremsen und ziehen Sie die Betthälften so weit auseinander, dass Sie zwischen den Liegeflächen hantieren können. Achten Sie beim Bewegen der Betthälften grundsätzlich darauf, dass Sie nicht versehentlich die Netzstecker aus den Steckdosen reißen.



Wussten Sie schon?

Im nächsten Schritt entfernen Sie das Verbindungskabel zwischen den Betthälften. Es ist unter beiden Liegeflächen jeweils in der weißen Steuerbox eingesteckt. Die Steckverbindung ist grün markiert.



Wussten Sie schon?

Ziehen Sie das Kabel aus beiden Steuerboxen heraus.



Wussten Sie schon?

Zum Lieferumfang des Bettes gehören zwei grüne Brückenstecker.



Wussten Sie schon?

Stecken Sie die grünen Stecker in die freigewordenen Anschlüsse des Verbindungskabels.



Wussten Sie schon?

Jetzt ist das Partnerbett getrennt und Sie können beide Liegeflächen separat mit ihren jeweiligen Handschaltern steuern.



Wussten Sie schon?

Wenn Sie das Bett einige Zeit später wieder zusammenfügen, müssen Sie es synchronisieren, um wieder beide Hälften mit einem Handschalter steuern zu können. Stecken Sie zunächst das Verbindungskabel in die Steuerboxen und verbinden Sie die Liegefläche mit den Brückenelementen.

Nehmen Sie dann einen der beiden Handschalter und halten Sie gleichzeitig die beiden Tasten in der dritten Reihe von oben gedrückt. Es ertönt ein Signalton, und das gesamte Bett fährt erst auf die maximale Höhe und dann in die Tiefposition. Wenn der Signalton verstummt, ist die Synchronisierung abgeschlossen.