

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Patienten mühelos und präzise wiegen

30. September 2021 // **Wussten Sie schon?**

Eine schnelle, präzise Gewichtsbestimmung des Patienten ist im Krankenhaus oft sehr wichtig. Die optionale integrierte Waage für unser Intensivbett Sicuro tera und das Krankenhausbett Evario schafft hier spürbare Erleichterung.

### **Integrierte Waage für unsere Betten Sicuro tera und Evario**

**Eine schnelle, präzise Gewichtsbestimmung des Patienten ist im Krankenhaus oft sehr wichtig. Das Gewicht kann z. B. großen Einfluss auf die Festlegung der bestmöglichen Medikation haben. Doch vor allem bei immobilen Patienten belastet das Wiegen auf einer separaten Waage alle Beteiligten. Die optionale integrierte Waage für unser Intensivbett Sicuro tera und das Krankenhausbett Evario schafft hier spürbare Erleichterung.**

Die Bedienung der Waage erfolgt intuitiv über einen Handschalter mit großem Display. Die Präzision der Messung liegt bei 200 Gramm und lässt sich temporär auf 100 Gramm steigern. Einfache Einstellungen am Handschalter helfen dabei, das Gewicht der Matratze oder wechselnder Zubehöre herauszurechnen. Mit der passenden optionalen Ausstattung arbeitet die Waage zugleich als Out-of-Bed-System und meldet über die Hausrufanlage, wenn der Patient aufsteht.

### **Entdecken Sie unsere neuen Funktionsvideos**

Wie einfach Sie die Waage am Evario oder Sicuro tera bedienen können, zeigt Ihnen unser Funktionsvideo auf YouTube. Dutzende solcher kleinen Videos hat unser Marketing in den vergangenen Monaten erstellt. Sie demonstrieren in leicht nachvollziehbaren Schritten, wie besonders wichtige Merkmale unserer Krankenhausbetten funktionieren – die Seitensicherung, der Handschalter oder die Sperrbox zum Beispiel. Neue Kolleginnen und Kollegen können sich auf diese Weise schnell und angenehm mit den Betten vertraut machen, ohne langwierig in der Gebrauchsanweisung zu blättern.

Die vielen Möglichkeiten der Waage zeigen Ihnen unsere Produktmanager Magdalena Höwelköger und

Lasse Radtke. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Videos kommentieren, liken oder teilen.