

FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



Per Tastendruck zum Wohlbefinden

06. Juli 2017 // **Produkte & Service**

Das Evario ist unser neues Klinikbett für alle Stationen. Zu den größten Stärken des Bettes zählt sein innovatives Bedienkonzept. Als Alternative zum praktischen LCD-Handschalter stehen ebenso intuitive Bedienpanels zur Auswahl.

Die integrierten Bedienpanels des neuen Klinikbettes Evario

Das Evario ist unser neues Klinikbett für alle Stationen. Zu den größten Stärken des Bettes zählt sein innovatives Bedienkonzept. Als Alternative zum praktischen LCD-Handschalter stehen ebenso intuitive Bedienpanels zur Auswahl.

Diese flachen, eleganten Module sind auf beiden Seiten des Bettes in die Protega-Seitensicherungen integriert. Sie zeigen jeweils nach innen eine einfach gestaltete Bedienfläche für den Patienten und nach außen weitergehende Optionen für die Pflegekraft oder den Techniker.

Dem Patienten bieten die Panels 4 Verstellmöglichkeiten, die im Alltag oft gewählt werden: die Höhenverstellung des Bettes, das Anstellen der Rückenlehne und der Oberschenkellehne sowie den Wechsel von der Liegeposition in eine bequeme Sitzhaltung. Lesen, Essen oder Aufstehen werden dadurch einfacher, das Wohlbefinden steigt und die Genesung wird gefördert.

Die Außenseite des Moduls ist mit einem Display versehen und ermöglicht die Auswahl getrennter Bedienebenen für Pflegekräfte und technisches Personal. Über die Komfort-Einstellungen hinaus lassen sich hier medizinisch indizierte Positionen wie zum Beispiel eine Trendelenburg-Verstellung auswählen. In einem Notfall kann die Pflegekraft zudem augenblicklich per Knopfdruck die CPR-Position auslösen.



In einem Notfall lässt sich augenblicklich die CPR-Position auslösen.



Patienten können intuitiv alle Komfortpositionen einstellen.

Praktisch und entlastend für die Pflegenden sind 3 voreingestellte Positionen der Rückenlehne (15°, 30°, 45°), die im Klinikalltag oft benötigt werden und sich beim Evario durch nur einen Tastendruck auf dem Modul nahe am Patienten anwählen lassen. Mithilfe des Displays und der Pfeiltasten lässt sich zudem schnell eine Cardiac-Chair- Position einstellen.

Die großen Vorteile des Evario sind auch in einem Video auf unserem YouTube-Kanal zusammengefasst. Unser Videoteam von „life is motion“ hat keine Mühen und Effekte gescheut, um das Bett perfekt in Szene zu setzen. Im nächtlichen Dunkelblau kommen zum Beispiel das beleuchtete Bedienpanel und das Unterbettlicht hervorragend zur Geltung. Models übernahmen die Rollen von Patientin und Krankenpflegerin – und bestätigten sofort, wie komfortabel und leicht zu bedienen das Bett ist. Sie finden das Video unter: [youtube.com/StiegmeyerDE](https://www.youtube.com/StiegmeyerDE)



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie Videos zum Evario und vielen weiteren Betten und Themen.

<https://www.stiegmeyer-forum.com/produkt-service/per-tastendruck-zum-wohlbefinden.html>