

# FORUM

Das Kundenmagazin der Stieglmeyer-Gruppe



## Vorteile des Vario-Safe-Systems in besonderen Situationen

27. Januar 2023 // **Wussten Sie schon?**

Stieglmeyer-Pflegebetten mit dem Vario-Safe-System sorgen für mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Der werkzeuglose Austausch von Seitensicherungen, Kopf- und Fußteilen ermöglicht die schnelle Anpassung der Betten an die Bedürfnisse verschiedener Bewohner. Doch auch ohne einen generellen Umbau des Bettes sorgt das Vario-Safe-System immer wieder für kleine Hilfestellungen im Alltag.

### Wussten Sie schon ...?

[Stieglmeyer-Pflegebetten](#) mit dem Vario-Safe-System sorgen für mehr Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Der werkzeuglose Austausch von Seitensicherungen, Kopf- und Fußteilen ermöglicht die schnelle Anpassung der Betten an die Bedürfnisse verschiedener Bewohner. Doch auch ohne einen generellen Umbau des Bettes sorgt das [Vario-Safe-System](#) immer wieder für kleine Hilfestellungen im Alltag. Ilona Wiemann, unsere Marketing-Produktmanagerin für den Bereich Pflegeheim, hat einige Beispiele für Sie zusammengestellt.



Ilona Wiemann, unsere Marketing-Produktmanagerin für den Bereich Pflegeheim, nennt Beispiele für die vielen Vorteile des Vario-Safe-Systems.

## Problemloser Bettentransport

Müssen unsere Betten in einen anderen Gebäudeteil geschoben werden, lassen sie sich gut steuern und selbst auf kleinem Raum präzise manövrieren. Dennoch können sehr enge Durchgänge zu Hindernissen werden. Das Vario-Safe-System löst hier viele Probleme: Da sich sämtliche Elemente des Bettumbaues werkzeuglos abnehmen lassen, wird das Bett minutenschnell erheblich schmaler und kürzer. Die Breite lässt sich von 104 auf 90 cm reduzieren, die Länge von 211 auf 202 cm. In einem Fahrstuhl mit schmaler Tür und unzureichender Tiefe kann das den entscheidenden Unterschied ausmachen.



Durch die werkzeuglose Entnahme des Umbaus wird der Bettenkorpus minutenschnell schmaler und kürzer – ideal für den Transport.

Nicht zuletzt wird das Bett durch die Entnahme des Umbaus auch leichter, sodass es sich einfacher über Schwellen schieben lässt und so das Risiko von Beschädigungen des Bettes oder des Fußbodens sinkt.

Die Vario-Safe-System ist so durchdacht gestaltet, dass die Seitensicherung das Bett auch ohne zusätzliche Blenden wohnlich verkleidet. Nur wenn keine Seitensicherung konfiguriert ist, treten Blenden an ihre Stelle. Dadurch wird das gesamte Bett schmaler, leichter handhabbar und vor allem hygienischer, da weniger Flächen und Nischen zu reinigen sind.

## Wenn die Körperpflege im Bett stattfindet

Wenn der Bewohner nicht mehr aufstehen kann, müssen viele Pflege-Routinen direkt am Bett erledigt werden. Hier kann die werkzeuglose Entnahme der Kopf- und Fußteile zu einer spürbaren Entlastung führen. Haarwäsche, Fußpflege und Physiotherapie sind dicht am Bewohner aus der optimalen frontalen Richtung möglich. Generell werden die Körperpflege und die Versorgung mit Windeln leichter, dazu trägt auch die ergonomische Pflegehöhe des Bettes von ca. 80 cm bei.



Die Entnahme der Bettenhäupter schafft freien Zugang für Haar- und Fußpflege sowie eine optimale Physiotherapie.

## Evakuierung im Notfall

Im unwahrscheinlichen Fall eines Brandes oder einer drohenden Überflutung zählt jede Sekunde, um die Bewohner zu evakuieren. Müssen bettlägerige Menschen auf ihren Matratzen aus dem Raum gebracht werden, kann die werkzeuglose Entfernung des Fußteils entscheidende Vorteile bringen. Die Matratze lässt sich dann schnell fußseitig von der Liegefläche ziehen. Das ist erheblich leichter als eine Evakuierung über

die Längsseite, die mehr Platz beansprucht und sich durch den Eindruck des Kippens für den Bewohner bedrohlicher anfühlt. Ideal für einen sicheren Transport auf der [Matratze](#) ist zudem unser Evakuierungsbezug mit Griffen und Gleit-Elementen an der Unterseite.



Die Evakuierung des Bewohners mitsamt Matratze ist über die Fußseite einfacher als über die Längsseite. Für zusätzliche Sicherheit sorgt unser Evakuierungsbezug.